

DERMAL MICRO NEEDLE

dermal micro needles



DERMAL MICRO NEEDLE

dermal micro needles

INICIO A DERMAL MICRO NEEDLE

Dermal Micro Needle , un dispositivo electrónico con un innovador sistema de micro-agujas para terapia de inducción de colágeno, empleado para el rejuvenecimiento facial y corporal mínimamente invasivo, en el cual se crean micro lesiones en la piel.

El concepto de micro-aguja está basado en la capacidad natural de la piel para autorregenerarse. Cada cabezal de agujas finas, punciona la piel y crea micro canales o micro heridas. Estas pequeñas lesiones desencadenan la producción de colágeno y elastina a nivel de la dermis papilar, con el fin de reparar las micro heridas, mejorando específicamente la textura, firmeza e hidratación.

Otra de sus características es el crear rutas transdérmicas o canales que incrementan la permeabilidad para la aplicación principios activos, con acciones reestructurantes, regenerantes y antiedad

BENEFICIOS DEL SISTEMA DERMAL MICRO NEEDLE

Con el sistema Dermal Micro Needle :se consiguen varios objetivos

- La micro lesión producida va a generar una inflamación y, por consiguiente, un aumento en la emisión de factores de crecimiento y multiplicación de los fibroblastos
- Producción de colágeno y elastina.
- Rejuvenecimiento de la piel.
- Relleno y mejora de la apariencia de la arruga y de la textura de la piel.
- Apertura de canales con profundidad para poder vehiculizar principios activos mejorando y potenciando el tratamiento Dermal.

INDICACIONES DEL SISTEMA DERMAL MICRO NEEDLE

El sistema Dermal Micro Needle está pensado para aquellas personas que quieran

- Revitalizar y rejuvenecer la piel del rostro.
- Eliminar o minimizar arrugas faciales, producidas por el sol, tabaco, estrés o envejecimiento.
- Eliminar o minimizar cicatrices leves de acné.
- Eliminar o minimizar líneas y finas arrugas en las zonas peri-orbitales o peri-bucles.
- Suavizar o difuminar los poros abiertos de la piel.
- Disminuir estrías recientes.
- Reafirmar los tejidos en caso de flacidez.
- Personas que estén valorando técnicas invasivas médico-estéticas como infiltraciones, rellenos, tratamientos con ácidos fuertes, etc.
- Aplicar principios activos.

DERMAL MICRO NEEDLE

dermal micro needles

Una de las ventajas destacable es que con el mismo dispositivo y cabezal se pueden realizar tratamientos faciales y corporales. Por ello, el dispositivo cuenta con una pequeña muesca donde se indica el punto de referencia para seleccionar la profundidad de trabajo. Junto a esta muesca, se encuentra la ruleta con las diferentes profundidades indicadas. Así de sencillo, se puede adecuar la profundidad de trabajo en la zona a tratar




VERDE	Velocidad media	Facial 1.296 microperforaciones/seg.
AZUL CLARO	Velocidad media	Facial 1.500 microperforaciones/seg.
AZUL OSCURO	Velocidad media-alta	Facial piel gruesa 1.700 microperforaciones/seg.
MORADO	Velocidad alta	Corporal zonas delicadas 1.920 microperforaciones/seg.
ROJO	Velocidad alta	Corporal zonas gruesas 2.000 microperforaciones/seg.

Otro parámetro que cabe destacar es que dispone de 5 velocidades. Si se mantiene pulsado el botón durante 2-3 segundos, se encenderá una luz verde. Si se vuelve a presionar el botón, va cambiando el color; esto nos indica la velocidad de inserción de la cabeza de la aguja.

DERMAL MICRO NEEDLE

dermal micro needles

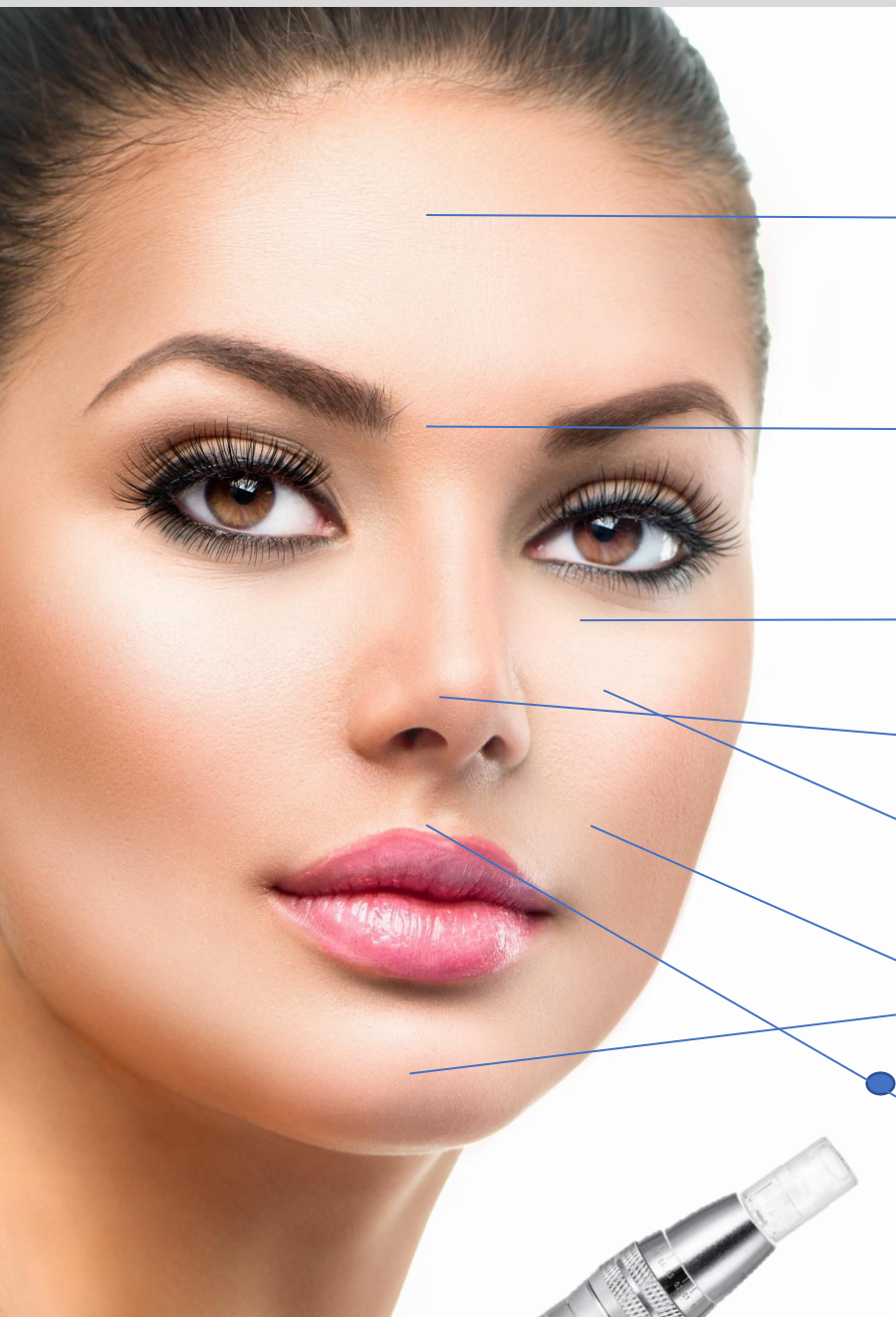

FRENTE

- Piel Fina 0,25-0,50 mm
- Piel Gruesa 0,50-0,75 mm

ENTRECEJO

- Piel Fina 0,25-0,50 mm
- Piel Gruesa 0,50-0,1 mm

PERIOCULAR

- Piel Fina 0,25 mm
- Piel Gruesa 0,50 mm

NARIZ

- Piel Fina 0,25 mm
- Piel Gruesa 0,50 mm

ARCO CIGOMATICO

- Piel Fina 0,25 mm
- Piel Gruesa 0,50 mm

MEJILLA MENTON

- Piel Fina 0,50-1,00 mm
- Piel Gruesa 1,00-200 mm

LABIO SUPERIOR

- Piel Fina 0,25- mm
- Piel Gruesa 0,50-0,75 mm

ESTRIAS

- Piel Fina 1,00-1,50 mm
- Piel Gruesa 150-200 mm

CICATRICES FACIALES

- Piel Fina 1,00-1,50 mm
- Piel Gruesa 150-200 mm

CICATRICES QUIRURGICAS Y QUEMADURAS

- Piel Fina 2,00
- Gruesa 2,50 mm

